



⚠ Leer antes de Usar ⚠

IDenta Touch&Know




Kits de Prueba de Drogas



Tarjeta de Procedimiento para IDT 9000T Detección General de Drogas Sustancia y Trazas

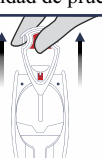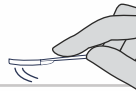


Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perfora ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Preparación de Prueba	1 Retire la sonda Smart-Tip™ de la unidad de prueba.	2 Muestree la sustancia o superficie sospechosa. (no se debe usar con materiales vegetales).
		Sustancia y Material de Trazas Pase el papel de la sonda Smart-Tip™ por la sustancia o superficie sospechosa. 

Preparación de Prueba	3 Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.	STOP No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.	4 Con pulgar e índice , apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.	5 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.
	 Las clavijas flexibles		Identificación Cámara 1 	

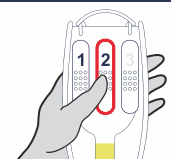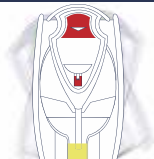Resultados Cámara 1		Sustancia: Si hay presente un polvo marrón, la aparición de un color púrpura-violeta indica fuertemente la presencia de Heroína Marrón . Si no hay presente un polvo marrón, la aparición de color púrpura-violeta indica la presencia de una sustancia alcaloide básica (posible droga - Ver lista más abajo) . Trazas: La aparición de color púrpura-violeta en la ventana frontal o posterior indica la presencia de Heroína Marrón o una sustancia alcaloide básica (posible droga - Ver lista más abajo) .
		La aparición de color verde o verde-azul en la ventana frontal o posterior indica la presencia de Crack .*
		Si se desarrolla cualquiera de los colores anteriores, proceda a la Eliminación. Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores, proceda al Paso 6.

Identificación Cámara 2	6 Con pulgar e índice , apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.	7 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.
		

Resultados Cámara 2		La aparición de color púrpura-violeta en la ventana frontal o posterior indica la presencia de una sustancia alcaloide básica (posible droga - Ver lista más abajo) .
		La aparición de color verde o verde-azul en la ventana frontal o posterior indica la presencia de Cocaína .*
		Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores, no hay presentes Cocaína ni ninguna de las sustancias en la Lista.

Lista	Puede estar presente una de estas drogas sospechosas:
	Heroína, Anfetamina, Metanfetamina, Éxtasis/MDMA, Bufedrona, Catinona, DMT, Fentanilo, Ketamina, Mefedrona, Metadona, Metcatinona, Metilona, mCPP, MDPBP, MDPV, MPA, PCP, PMA, PMMA, 2-aminoindano, otras drogas sintéticas/de diseño.*

Eliminación Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura. 

* Se pueden obtener resultados más definitivos con Kits de Prueba de Drogas IDenta específicos.

Todos los resultados son de presunción.

Si es necesario, pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente pueden proporcionar identificación adicionales. **Trazas:** También se puede aplicar confirmación de trazas por laboratorio dado que la prueba es no destructiva. El kit de prueba puede ser enviado a un laboratorio de pruebas de drogas.